

1. Kaapin sijoittelu
2. Kaappi asennetaan seinälle tai telineeseen.
3. Sähköliitäntä Jännite 230 V, suojataan vikavirtasuojakytkimellä
4. Tekniset tiedot
5. Kunnossapito/puhdistus


## 1. Suositeltu asennuskorkeus (katso piirustus)

Kaappi on valmistettu kestävästi ripustaminen kaikissa tavanomaisissa olosuhteissa.


Kunnossapidon kannalta on hyvä aina ripustaa sydämenkäynnistinkaappi siten, ettei siihen kohdistu suoraa auringonvaloa

Jos kaappi asennetaan katoksen alle siten, ettei se altistu sateelle (*sadevedelle*), suositellaan kaapin pesemistä säännöllisesti, koska muuten siihen saattaa muodostua kerrostumia.

Wall side view

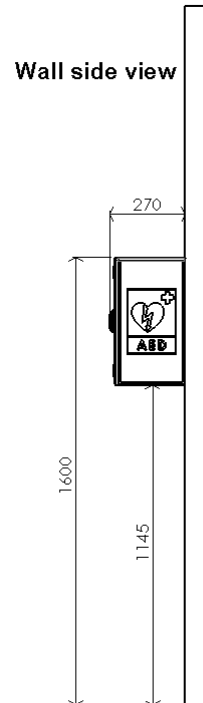

Wall viewed from the front

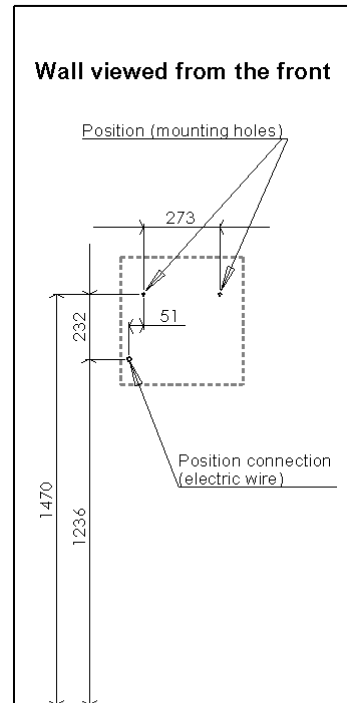

## 2. Kaappi asennetaan seinälle tai seistä, läpi 2 reikää takalevy.

(Seinän on oltava suora ja kestävä. KAAPPIA EI SAA VÄÄNTÄÄ)



## 3. AINOASTAAN VALTUUTETTU SÄHKÖASENTAJA SAA TEHDÄ SÄHKÖASENNUKSEN

Kaapin Pitäisi jännite on 230 V. Suosittelemme käyttämään omaa ryhmäänsä.


PG M16 ja suojatappi voidaan asentaa kiinteästi kaapin taakse tai pohjaan, asennustavan mukaan.



Kierrä auki kahta LED-valolla varustetun suojalevyn kuusiokulmaruuvia ja työnnä levy sivuun.





Sen takana on ohjausyksikkö, johon Vaihe-, nolla- ja suojajohtimet liitetään.

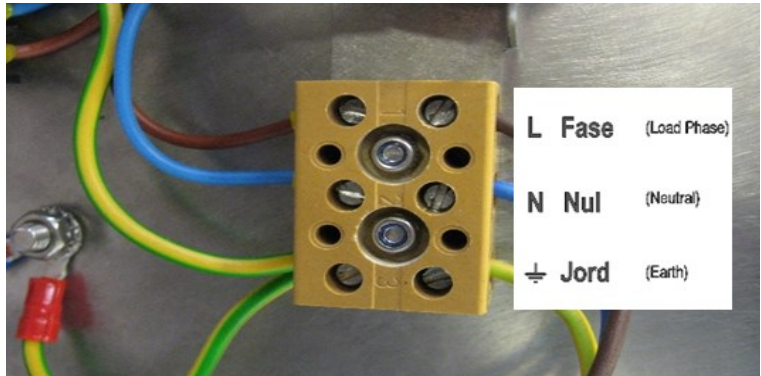

Kytke sireeni pois päältä huollon ajaksi. Paina huoltopainiketta ruuvimeisselillä yhden kerran.

Avaa LED-valolla varustettu suojalevy ja työnnä levy sivuun.  
Kytke virta pois päältä liukukytkimellä.

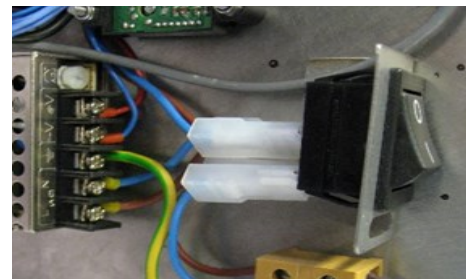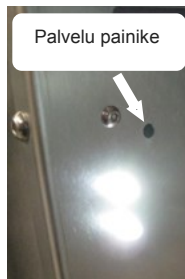

#### 4. Tekniset tiedot:

Käyttöjännite 230 V. (Vaihe-, nolla- ja suojajohtimet)  
Virrankulutus tavanomaisessa käytössä = 40 mA (10,2 Wh)  
Korkeintaan. Virrankulutus = 500 mA (116 Wh)

#### 5. Kunnossapito/puhdistus:

Suosittellemme puhdistamaan kaapin säännöllisesti vähintään 1-2 kertaa vuodessa.  
Käytä puhdistukseen sulfoa kosteassa rätissä tai harjassa ja huuhtelee sen jälkeen puhtaalla vedellä. Kuivaa aina lopuksi kuivalla rätillä.  
Mahdolliset jäänteet näkyvät kerrostumina pinnalla, josta ne on helppo pyyhkiä pois.  
Vaikeammin puhdistettaviin voidaan käyttää hankaussientä. **Älä käytä milloinkaan teräsvillaa.**